

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

クイック チェイサー® 陽性コントロール Strep A

【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

クイック チェイサー® Strep A

クイック チェイサー® Dip Strep A

【使用方法】

- 1) 使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリーバイアルを取り出します。
 - 2) 30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
 - 3) 陽性コントロールの入ったスクリーバイアルをよく混和して下さい。
※本陽性コントロールはスクリーバイアル1本につき1回のみ使用可能です。
 - 4) 対象製品付属の滅菌綿棒(咽頭用)を陽性コントロールに10秒以上浸し、綿球部全体に染み込ませて採取します。
- *5) 対象製品の電子化された添付文書に従い、試料の調製を行い、測定を行います。
- *6) 測定結果が陽性であることを確認して下さい。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

【使用上又は取り扱い上の注意】

1) 取り扱い上(危険防止)の注意

- ① 本品には保存剤としてアジ化ナトリウム (0.1%未満) が含まれています。使用中に誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。

2) 使用上の注意

- ① 使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
- ② 陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
- ③ 使用後の陽性コントロール及び容器、テストプレート、又はテストストリップ、綿棒等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm、1時間以上浸漬)又はグルタルアルデヒド(2%、1時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121°C、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。
- ④ 容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
- ⑤ 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法】

2～8℃保存

****【有効期間】**

製造後36ヵ月

使用期限はスクリーバイアルラベル及び外装箱に表示

****【包装単位】**

クイック チェイサー® 陽性コントロール Strep A 400μL×3本

****【お問い合わせ先】**

株式会社ミズホメディー 学術担当窓口

フリーダイヤル 0120-12-4636（受付：月～金（祝日を除く）9:00～12:00 13:00～17:00）

株式会社 **ミズホメディー** 佐賀県鳥栖市藤木町 5 番地の 4

「クイック チェイサー」は(株)ミズホメディーの登録商標です。