

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

クイック チェイサー® 陽性コントロール 肺炎球菌

【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

クイック チェイサー® 肺炎球菌 II

クイック チェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ

【使用方法】

- 1) 使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリーブバイアルを取り出します。
- 2) 30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 3) 陽性コントロールの入ったスクリーブバイアルをよく混和して下さい。
※本陽性コントロールはスクリーブバイアル1本につき1回のみ使用可能です。
- *4) 対象製品の電子化された添付文書に従い、対象製品付属のスポイトを用い、測定を行います。
- 5) 測定結果が肺炎球菌陽性であることを確認して下さい。2項目を同時に測定する対象製品においては肺炎球菌以外の項目は陰性となります。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

【使用上又は取り扱い上の注意】

- 1) 取り扱い上(危険防止)の注意
 - ① 陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 2) 使用上の注意
 - ① 使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
 - ② 陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
 - ③ 使用後の陽性コントロール及び容器、テストプレート、スポイト等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm、1 時間以上浸漬)又はグルタルアルデヒド(2%、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121°C、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。
 - ④ 容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
 - ⑤ 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法】

2～8℃保存

****【有効期間】**

製造後24ヵ月

使用期限はスクリーバイアルラベル及び外装箱に表示

****【包装単位】**

クイック チェイサー® 陽性コントロール 肺炎球菌 400μL×3本

****【お問い合わせ先】**

株式会社ミズホメディー 学術担当窓口

フリーダイヤル 0120-12-4636（受付：月～金（祝日を除く）9:00～12:00 13:00～17:00）

株式会社 **ミズホメディー** 佐賀県鳥栖市藤木町 5 番地の 4

「クイック チェイサー」は(株)ミズホメディーの登録商標です。