

# クイック チェイサー® 陽性コントロール SARS-CoV-2

## 【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

- クイック チェイサー® SARS-CoV-2
- クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu
- クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A,B
- クイック チェイサー® SARS-CoV-2/RSV

## 【使用方法】

- 使用前に冷蔵庫から必要な本数のスクリーバイアルを取り出します。
- 30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 陽性コントロールの入ったスクリーバイアルをよく混和して下さい。  
※本陽性コントロールはスクリーバイアル1本につき1回のみ使用可能です。
- 対象製品付属のニプロスポンジスワブを陽性コントロールに10秒以上浸し、綿球部全体に染み込ませて採取します。
- 対象製品の電子化された添付文書に従い、試料の調製を行い、測定を行います。
- 測定結果がSARS-CoV-2陽性であることを確認して下さい。多項目を同時に測定する対象製品においてはSARS-CoV-2以外の項目は陰性となります。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

## 【使用上又は取り扱い上の注意】

- 取り扱い上(危険防止)の注意
  - 陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 使用上の注意
  - 使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
  - 陽性コントロールは、リコンビナント抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
  - 使用後の陽性コントロール及び容器、テストプレート、スワブ等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬)またはグルタルアルデヒド(2%、1時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121°C、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。
  - 容器ラベル及び外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
  - 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

**【貯蔵方法】**

2～8℃保存

**【有効期間】**

製造後24ヵ月

使用期限はスクリーバイアルラベル及び外装箱に表示

**【包装単位】**

クイック チェイサー® 陽性コントロール SARS-CoV-2 150  $\mu$ L×3本

**【問い合わせ先】**

株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口

佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

フリーダイヤル:0120-12-4636

FAX:0942-85-0335