

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

クイック チェイサー® 陽性コントロール 便潜血


【使用目的】

本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

クイック チェイサー® 便潜血

【使用方法】

- 1)使用前に冷蔵庫から必要な本数の本品の容器を取り出します。
- 2)30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 3)キャップをとりはずした後、付属のフィルターを取り付け、容器を数回、軽く揺すって十分に混和します。
※本品の容器のキャップをとりはずした後、1回のみを使いきりとして下さい。
- 4)本品2滴(約100 μ L)をテストプレートの検体滴下部にフィルターの先端が滴下口部に接触しないようにして、垂直に滴下して下さい。

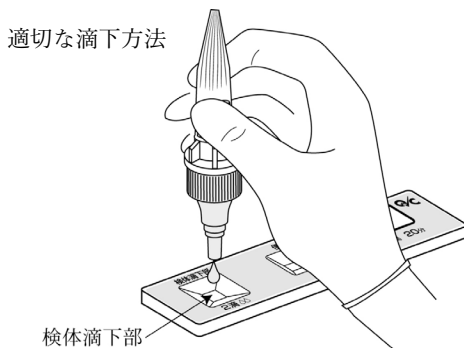

- 5)対象製品の電子化された添付文書に従い、測定を行います。
- 6)測定結果がヘモグロビン陽性、トランスフェリン陽性であることを確認して下さい。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

【使用上又は取り扱い上の注意】

- 1)取り扱い上(危険防止)の注意
 - ①陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 2)使用上の注意
 - ①使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。

- ②陽性コントロールは、HBsAg, HCV, HIV-1/HIV-2 が陰性であることが確認されたヒト由来物質を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。
- ③陽性コントロール中には、防腐剤として 0.1%アジ化ナトリウムを含有しています。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際は多量の水と共に流して下さい。
- ④使用後の陽性コントロール及び容器、テストプレート等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm、1 時間以上浸漬)又はグルタルアルデヒド(2%、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。
- ⑤外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
- ⑥試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法】

2～8℃保存

【有効期間】

製造後12ヵ月

使用期限は外装箱に表示

【包装単位】

- ・クイック チェイサー® 陽性コントロール 便潜血…………… 0.5mL×3本
- ・付属品 フィルター…………… 3 個
- フィルターキャップ…………… 3 個

【お問い合わせ先】

株式会社ミズホメディー 学術担当窓口

フリーダイヤル 0120-12-4636 (受付：月～金(祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00)