

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

クイック チェイサー® 陽性コントロール H.ピロリ

【使用目的】


本品は以下の対象製品専用の陽性コントロールです。対象製品での検査の精度管理に使用します。

クイック チェイサー® H.ピロリ

【使用方法】

- 1) 使用前に冷蔵庫から必要な本数の本品の容器を取り出します。
- 2) 30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。
- 3) キャップをとりはずした後、付属のフィルターを取り付け、容器を数回、軽く揺すって十分に混和します。
※本品の容器のキャップをとりはずした後、1回のみを使いきりとして下さい。
- 4) 本品3滴(約110 μ L)をテストプレートの試料滴下部にフィルターの先端が滴下口部に接触しないようにして、垂直に滴下して下さい。

適切な滴下方法

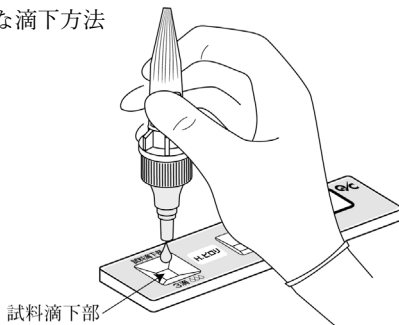

- 5) 対象製品の電子化された添付文書に従い、測定を行います。
- 6) 測定結果がH.ピロリ陽性であることを確認して下さい。正しい結果が得られなかった場合、測定方法の誤りや、対象製品、陽性コントロール(本品)の劣化等が考えられます。測定方法や対象製品、陽性コントロール(本品)の使用期限などを確認して下さい。

【使用上又は取り扱い上の注意】

- 1) 取り扱い上(危険防止)の注意
 - ① 陽性コントロールが誤って目や口等に入った場合は、水で十分洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 2) 使用上の注意
 - ① 使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用目的及び使用方法以外での使用については、結果の保証ができません。
 - ② 陽性コントロールは、不活化処理をした抗原を用い調製しておりますが、検体と同様に感染性のあるものとして取り扱って下さい。

- ③使用後の陽性コントロール及び容器、テストプレート等は感染の可能性があるものとして、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm、1 時間以上浸漬)又はグルタルアルデヒド(2%、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20分以上)による滅菌処理を行って下さい。
- ④外装箱に表示の使用期限内に使用して下さい。
- ⑤試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法】

2～8℃保存

【有効期間】

製造後12ヵ月

使用期限は外装箱に表示

【包装単位】

- ・クイック チェイサー® 陽性コントロール H.ピロリ …………… 0.5mL×3本
- ・付属品 フィルター…………… 3 個
- フィルターキャップ…………… 3 個

【お問い合わせ先】

株式会社ミズホメディー 学術担当窓口

フリーダイヤル 0120-12-4636 (受付:月～金(祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00)