

この説明書をよく読んでから使用して下さい。

*2019年8月改訂(第2版)
2019年1月作成(第1版)

MIZUHO MEDY Co., Ltd.


クイックチェイサー® H.ピロリ 採便セット

【形状・構造等(キットの構成)】

1) 抽出液(採便容器)


【採便方法】

●採便容器各部名称

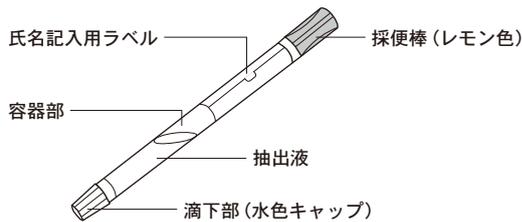

●便のとり方

①レモン色キャップ(採便棒)を左に軽くまわしながら取り外します。

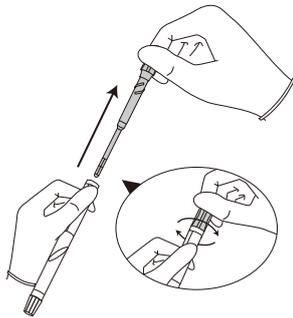


※この時点では水色キャップは外さないで下さい。レモン色の採便棒を外した状態で容器部の開口部を横や下に向けると、容器内部の液がこぼれる可能性があります。容器は分解しないで下さい。正しく検体採取できなくなる可能性があります。

②採便棒の溝部を満たすように、便をまんべんなくこすりつけて下さい。




※便の性状によっては、正しく採取できない可能性がありますので、できるだけ溝部を満たすように採取して下さい。採便棒の先端部分に付着した便は取り除いて下さい。採便棒で直腸から直接採便しないで下さい。

③採便棒を容器部に入れ、右に軽くまわしながら押し込みます。

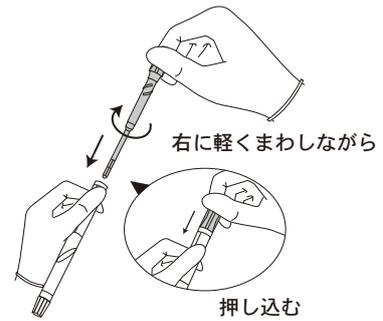

※採便棒を右へ軽くまわしながらしっかり押し込んで下さい。

④採便容器を強く数回振って、溝に付着した便を均一に懸濁し便懸濁液をつくり、試料とします。

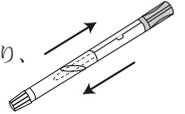

【採便に際しての留意事項】

1) 検体は新鮮な糞便を用いて下さい。

【取扱い上の注意】

1) 採便容器を患者に渡す場合は、次のことを注意して下さい。

- ①採便容器の抽出液は、飲んだり、点眼、点鼻したりしないで下さい。もし、誤って飲んだり、点眼、点鼻したりした場合は、水でよく洗い流して医師の診断を受けて下さい。
- ②子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 2) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 3) 調製後の試料はすみやかに検査して下さい。試料をやむをえず保存する場合には、7日までは30℃以下、7日を超える場合には冷蔵保存して下さい。使用する時には15～30℃に戻してから使用して下さい。
- 4) H.ピロリ抗原検査は、テストプレート(別売品)の添付文書に従って操作して下さい。
- 5) 検査時に採便容器内で便が沈殿している場合は、糞便が均一に懸濁するまで十分に攪拌して下さい。
- 6) 採便容器から便懸濁液が漏れないように、採便棒はしっかり押し込んで下さい。
- 7) 採便容器滴下部のキャップがはずれると液漏れしますので、測定まではキャップを回さないで下さい。
- 8) 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

*【貯蔵方法・有効期間】

- ・貯蔵方法：室温(1～30℃)
- ・有効期間：24ヵ月(使用期限は外装に記載)

【包装単位】

クイックチェイサー® H.ピロリ 採便セット 10回用

- ・抽出液(採便容器)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10本
- ・付属品 患者様説明書(便のとり方)・・・・・・・・ 10枚
- ビニール袋(提出用袋)・・・・・・・・・・・・・・・・ 10枚

文献請求及びお問い合わせは

株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口
佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4 フリーダイヤル 0120-12-4636
FAX 0942-85-0335

「クイックチェイサー」は(株)ミズホメディーの登録商標です。